




1

Insérez les deux (2) sangles (partie loupe) sur chacune des extrémités de la base en V.



2

Glissez les sangles jusqu'au creux du pli de la base en V.

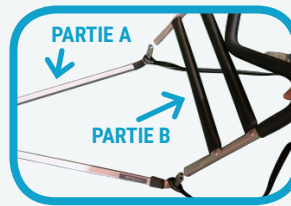

3

Installez la poignée (Partie B) sur la base en V (Partie A) jusqu'à ce que les boutons connecteurs soient bien enclanchés.



4



5

Positionnez la barre en dessous du matelas donc sur la structure du lit ou du sommier.

Enlevez le matelas afin de faciliter l'installation de la barre et des sangles.



6

En présence d'un lit articulé, fixez la barre d'appui sur un plateau seulement.

Ne jamais l'installer sur deux (2) plateaux ou dans les joints (articulations).



7

Positionnez la barre de lit le plus près possible de la tête de lit de façon à respecter les normes.



8

Positionnez les sangles en dessous du lit. **Pas nécessaire de les positionner en X.**



9

Sangles positionnées en dessous du cylindre



S'assurer que les sangles n'interfèrent pas avec aucun mécanisme du lit et/ou accessoires. Important qu'il n'y ait pas d'effet ciseaux.

ATTENTION: Ne pas positionner sur des endroits tranchants (coupants);

Dans le cas d'un lit avec une structure uniforme ou en présence d'un sommier, assurez-vous de positionner les sangles de façon fixe.



10

Insérez les grandes loupes des sangles à l'extrémité de la base en V autour de la plaque en T et les petites loupes à l'autre extrémité de la base en V (réf. photo #1).



11

Placez-vous face à la poignée; Ajustez la tension des sangles en tirant sur le bout; S'assurer qu'elles soient bien tendues.



12

S'assurer que les sangles ne soient pas entortillées (sans tension).

Important de mettre les boucles vers le haut.

- **La barre d'appui ne doit pas bouger ; Ne jamais retirer les sangles de la boucle ;**
- Cette barre d'appui aide les personnes à se relever et à sortir du lit.
- Consignes de nettoyage : Produits détergents sans abrasif et désinfectant.
Garantie un (1) an sur la structure rigide et 90 jours pour les autres composantes contre tous défauts de fabrication à partir de la date d'achat ;
- Cette garantie ne s'applique pas dans le cas d'un mauvais usage, d'un abus ou suite à une modification par l'utilisateur.

NOTE : Pour tous les bénéficiaires, utilisateurs et distributeurs de la barre d'appui BED-AID STAB:

1. La présente mise en garde fait partie intégrante du mode d'utilisation et du bon de livraison et/ou facturation de la barre d'appui « BED-AID STAB » ;
2. Toute personne qui installe la barre d'appui « BED-AID STAB » doit avoir reçu une formation du fabricant ou de ses distributeurs attitrés ou doit avoir pris connaissance du manuel d'instruction ;
3. Ne jamais utiliser la barre d'appui « BED-AID STAB » sans que les sangles de fixation soient bien installées et bien tendues tel que précisé dans le manuel d'installation du fabricant ;
4. Le bénéficiaire ou l'utilisateur de la barre d'appui doit vérifier régulièrement si les sangles de fixation sont bien fixées, bien tendues et en bon état, afin d'éviter que la barre d'appui glisse ou se déplace sous le matelas ;
5. Toute modification à la barre d'appui et à son système d'ancrage est formellement interdite et dégage automatiquement le fabricant de toutes responsabilités quand à l'utilisation de celle-ci ;
6. Si, suite à une utilisation normale et à une usure fonctionnelle, des pièces de la barre d'appui doivent être remplacées, il est nécessaire que les pièces de rechange soient remplacées par des pièces de même qualité ou équivalentes à celles fournies initialement. Vous devez contacter le fabricant ou son distributeur ;
7. La barre d'appui et les sangles de fixation doivent être installées sur un seul panneau, si le lit utilisé en est un de type articulé et ce, qu'il soit utilisé dans un centre hospitalier, un centre d'hébergement ou une résidence privée ;
8. Le poids maximum de l'utilisateur de la barre d'appui est de 300 livres (136 kilogrammes) ;
9. L'excédent des sangles de retenue doit être glissé entre le matelas et le panneau du lit d'une façon sécuritaire, elles ne doivent pas être accessibles par l'utilisateur ;
10. La barre d'appui et les sangles de fixation ne doivent jamais interférer ou nuire à aucun mécanisme du lit¹ ;
11. Aucune garantie du fabricant ne s'appliquera si la barre d'appui est mal installée, ou modifiée et ce, sans l'approbation écrite du fabricant ;
12. La barre d'appui ne doit jamais être installée sur le lit d'un nouveau-né, enfant ou de toute personne dont la largeur de la tête est inférieure à 4 $\frac{3}{4}$ " ou 12,06 centimètres (1) ;
13. Si après une installation conforme au manuel d'instructions, la barre d'appui « Bed-Aid STAB » n'est pas fixe (stable), vous devez en aviser immédiatement le fabricant ou le distributeur autorisé ;
14. Le fabricant se décharge de toute responsabilité si la barre d'appui n'est pas installée ou utilisée selon le manuel d'instruction ;
15. Il appartiendra à l'installateur de la barre d'appui de tenir compte de l'environnement du bénéficiaire et de son état de santé pour déterminer si des interventions en plus de la barre d'appui sont nécessaires et si l'utilisation est appropriée et/ou conforme ;
16. La barre de lit doit être installée avec un matelas d'un minimum de 6" d'épaisseur avec un affaissement de 1".

¹ Référence publication de la ligne directrice Lits d'hôpitaux : Risque de piégeage des patients, fiabilité du verrouillage et autres risques, (08-107422-917) de Santé Canada pour les mesures anthropométriques, zone coincement.